

FACE CARE PLUS



Descrição

Completíssimo, totalmente digital e microcontrolado, o novo Face Care Plus é o equipamento multifuncional que você sempre sonhou para a sua cabine de estética facial: moderno, prático, completo e funcional. O aparelho conta com os seguintes recursos:

- Microcorrentes faciais;
- Microcorrentes corporais;
- Corrente russa e australiana;
- Isometria e isotonia;
- TENS/analgesia e FES;
- Alta frequência;
- Lontoforese/ionizador;
- Desincruste;
- Eletrolifting, galvano e estrias;
- Brushing (escovas giratórias);
- Vaporizador;
- Vácuoterapia facial;
- Endermoterapia corporal "opcional";
- Peeling de diamante "opcional".

O Face Care Plus possui um poderoso processador que permite realizar até 4 funções simultaneamente, software de programação que possibilita ao profissional ajustar todos os parâmetros das correntes de acordo com as literaturas existentes.

Recursos

- Display de LCD azul;
- Teclas soft touch;
- Programas automáticos;
- Timer digital para todas as funções;
- Bocal de Alta Frequência com botão de acionamento;
- Processa três funções e tem microampères;
- É o único com alta frequência totalmente digital
- Tem design moderno com opção de cores de acabamento.

Diferenciais

- Design inovador com linhas fluidas;
- Segurança;
- Multiprocessamento de funções;
- Variedade de funções.

Segurança em primeiro lugar!


Além de todas as funcionalidades citadas anteriormente, o Face Care Plus foi projetado com os seguintes recursos, importantíssimos para a Segurança da Aplicação:

- Cabos de saídas com plugs diferentes para cada função, evitando erros de conexão;
- Biblioteca de programas e funções com valores preconizados para cada função;
- Bloqueio de ajuste de intensidade do estimulador quando a corrente está no ciclo "off" (evita choque);
- Reconhecimento de conexão de cabos;
- Alta frequência com sistema digital de geração de frequência e controle da intensidade, o que proporciona maior conforto na aplicação;
- Bocal de Alta Frequência com botão de acionamento.

Descrição das funções:

Microcorrentes

Poderoso recurso de tratamento que utiliza em seu procedimento de aplicação uma corrente elétrica polarizada de baixa frequência de modulação e intensidade. O processo ativa o metabolismo local, estimula a produção de colágeno, auxilia na eliminação de toxinas, aumenta a produção de ATP em até 500% e tem vários outros efeitos que o transforma em uma excelente e importante técnica de tratamentos estéticos faciais e corporais. É ideal para rejuvenescimento e revitalização tissular – com indicações também para fisioterapia para cicatrização de feridas – em tratamento de lesões musculares e na medicina estética em procedimentos pré e pós-cirúrgico de lipoaspiração, carboxiterapia e cirurgia plástica em geral, reduzindo edemas, drenando e ativando o processo de cicatrização. Para esta função, dispõe do “exclusivo modo VIF”, que proporciona melhores resultados e evita a acomodação do tecido.

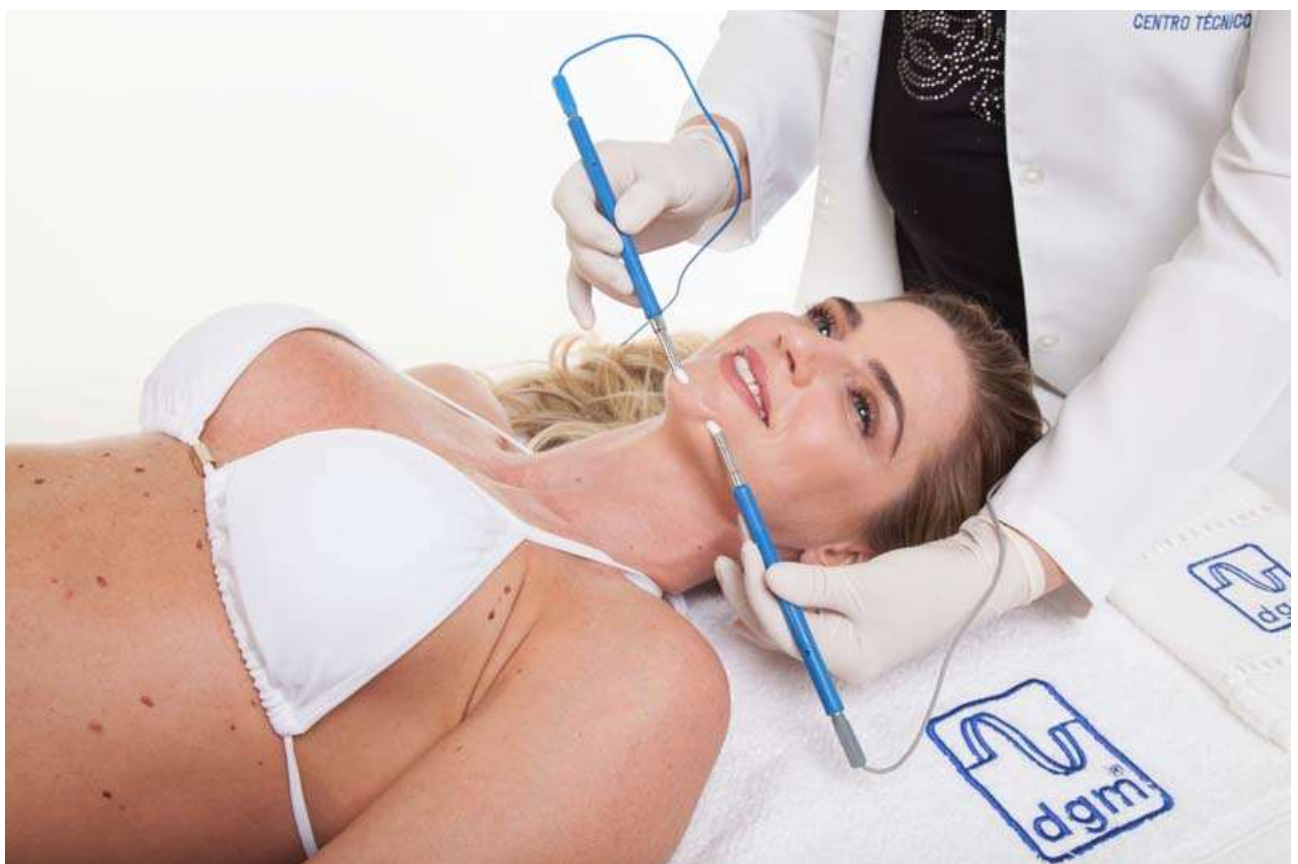

MICROCORRENTES FACIAL

Corrente russa

Modo de estimulação muscular que utiliza uma corrente de média frequência, modulada com uma baixa frequência de corte, proporcionando melhor conforto durante o tratamento. A aplicação é realizada por meio de eletrodos, que são posicionados na origem e inserção da musculatura ou ventre da mesma. As contrações musculares são produzidas de acordo com os ajustes dos tempos de modulação de amplitude, como: tempo de subida, sustentação, descida e repouso.

Nos tratamentos estéticos faciais, é indicada para fortalecimento da musculatura, melhorando a flacidez e atenuando as linhas de expressão. Nos corporais, para redução da flacidez muscular do abdômen, coxas, glúteos, braços e como auxiliar no incremento do consumo e queima calórica para melhora do contorno corporal.

Em fisioterapia, funciona como uma ferramenta importante para ser associada a outros procedimentos de fortalecimento e recuperação da musculatura lesada.

Australiana

É uma forma de estimulação muscular muito semelhante à Corrente Russa, se diferenciando apenas no ciclo de trabalho, que é menor. Ou seja, é como uma Corrente Russa com modulação de microampère de corte com curto intervalo de passagem de corrente.

Este curto intervalo de passagem de corrente proporciona um conforto ainda maior, porém, é necessário aplicar uma dose com maior intensidade. Tem as mesmas indicações da Corrente Russa.



• CORRENTE RUSSA, AUSTRALIANA FACIAL

Isometria e Isotonia

A isometria é uma forma de estimulação com um tempo superior a 5 segundos, que tem como objetivo o fortalecimento muscular. Já a Isotonia é uma forma de estimulação mais rápida, com o objetivo de melhorar o tônus muscular.

TENS/Analgesia

Forma de estimulação muscular que produz importante parestesia e, conseqüentemente, um efeito analgésico local. Pode ser utilizado para inibir a sensação da introdução de agulhas em procedimentos invasivos da medicina estética e reabilitação esportiva.

FES

A Estimulação Elétrica Funcional é um recurso que se permite ajustar todos os parâmetros da corrente em função do objetivo estético ou de reabilitação.

Alta frequência

O método de aplicação consiste em passar sobre a pele ou região o eletrodo de vidro que contem gás neon, produzindo microfaíscas que, por sua vez, geram gás ozônio com propriedades: fungicidas, bactericidas, bacteriostáticas e cicatrizantes. O procedimento é indicado para: acne, pós-limpeza de pele, tratamento capilar de queda e seborreia, pós-depilação, cicatrização de feridas e cortes.



ALTA FREQUENCIA

Iontoforese/Ionização

Este tratamento tem como principal finalidade auxiliar na penetração e veiculação de cosméticos e princípios ativos no tecido por meio da eletrólise. Nele, é utilizada a corrente galvânica, onde a aplicação é feita por meio de um eletrodo em forma de rolete, passado sobre a região onde se deseja aplicar o produto. A polaridade da corrente deverá ser a mesma do produto.



• IONIZAÇÃO FACIAL

Desincruste

Método que também utiliza corrente galvânica, mas com a finalidade de retirar o excesso de oleosidade/sebosidade da pele. A aplicação é realizada com uma caneta tipo gancho, enrolada em uma gaze umedecida com um produto desincrustante.



• DESINCRUSTE

Eletrolifting

Com a finalidade de reduzir e atenuar as linhas de expressão, esta técnica utiliza a corrente galvânica na faixa de microampères, onde a aplicação pode ser realizada com uma caneta com agulha, para efetuar uma punção superficial da linha de expressão, ou por uma caneta tipo ponta sobre a mesma.

Brushing

É um acessório opcional muito utilizado na Europa. Este recurso é uma forma obter um grande diferencial nos tratamentos. O cabeçote motorizado possui três opções de ponteiros:

Ponteira com Escova: utilizada com espuma de limpeza facial, aumenta a eficácia da limpeza e gera efeito esfoliante.

Ponteira com suporte de gaze: pode ser utilizada com uma esponja de limpeza facial ou compressa de gaze. Para a aplicação, deve-se usar a espuma de limpeza facial que, além da eficácia da limpeza, produz uma sensação muito agradável pela rotação da ponteira. Recomendamos este tipo de ponteira, pois a esponja ou gaze é descartada no final.

Ponteira com esferas: esta ponteira deve ser utilizada na finalização do tratamento, em conjunto com um cosmético ou filtro solar. Os movimentos giratórios das esferas produzem um efeito massageador muito agradável. Sua cliente vai adorar!



BRUSHING / ESCOVAS GIRATÓRIAS

Vaporizador

A ação do vapor gera efeitos vasodilatadores e emolientes na pele, facilitando o processo de limpeza, extração e remoção de pústulas e comedões. É indicado também para tratamento capilar e podologia.



VAPORIZADOR FACE CARE PLUS / ESCOVAS GIRATÓRIAS

Vácuoterapia

Este importante recurso permite realizar a limpeza de pele com extração a vácuo, conhecida no mercado como hidrosucção. Funciona ainda para massagem e dermotonificação do tecido, assim como na depressodrenagem facial.

Endermoterapia “opcional”

Reconhecido no mercado como um dos tratamentos mais eficazes para a gordura localizada e a celulite nos seus diversos graus, este método consiste em massagear o tecido com cabeçotes munidos de roletes, que auxiliam a quebra da fibrose. Por ser um recurso opcional, os acessórios devem ser adquiridos a parte, diretamente com a DGM ou por meio de seus representantes.



•
ENDERMOTERAPIA

Peeling de diamante

Este é um recurso opcional do equipamento, devendo ser adquirido à parte. O kit é composto de uma caneta aplicadora e seis tipos de ponteiros diamantados. Para o funcionamento, basta acoplar na entrada de vácuo, selecionar a função, regular a pressão e efetuar a aplicação da ponteira com manobras circulares ou de vai e vem na região onde se deseja exercer o efeito abrasivo.



PEELING DIAMANTES

Características técnicas

- Rede elétrica: 110/220 Volts – 50/60 Hz;
- Consumo: 40 VA;
- Peso: 4,5Kg;
- Dimensões (LXPXH): 45 x 27 x 12cm.

Acessórios

- 01 bomba multiuso;
- 01 pacote com 30 pontas de cotonete;
- 01 mangueira lisa com 6 mm x 1,5 m;
- 01 gel condutivo/ultrassom com 100 ml;
- 01 pacote com 50 adesivos faciais;
- 01 escova grande de brushing;
- 01 escova pequena de brushing;
- 01 cabo de força com 3 pinos;
- 02 cabos duplo com pino banana az/cz (8 pinos);
- 01 cabeçote motorizado de brushing;

- 01 bocal com alta frequência;
- 01 conj. de 4 ventosas faciais + conexão com 6 mm;
- 01 caneta gancho para desincruste;
- 01 caneta rolinho facial;
- 02 canetas simples para microcorrentes;
- 01 caneta para eletrolifting;
- 01 bastonete;
- 02 agulhas 0,20 para eletrolifting;
- 01 conjunto de 6 eletrodos de alta frequência;
- 01 funil;
- 01 cabos quádruplos com 4 placas faciais (5 pinos).

Acessórios opcionais

- Kit com luva condutiva para microcorrentes;
- Cabo com placas e bastonete p/ luva de microcorrentes
- Mangueira espiralada com 6 mm x 1,5 m;
- Conjunto de mangueira lisa 6 mm x 1,5 m + conexão para ventosa M6;
- Kit para peeling de diamante;
- Mangueira lisa com 6 mm x 1,5 m;
- Ventosa corporal chata;
- Ventosa corporal redonda;
- Caneta rolinho corporal;
- Caneta esférica;
- Caneta com ponta antirrugas;
- Eletrodo pocinho;
- Eletrodo rabo de peixe;
- Eletrodo cachimbo médio;
- Eletrodo cachimbo grande;
- Cabeçote de haste para vacuoterapia;
- Cabeçote de rolete pequeno para vacuoterapia;
- Eletrodo rolinho de alta frequência;
- Bastão corporal para microcorrentes;
- Caneta dupla para microcorrentes;

- Ponteira porta-algodão/gaze brushing;
- Ponteira com 5 esferas massageadoras brushing.