

## Plasmax – Aparelho de Jato de Plasma Portátil – KLD



### O Plasmax é um super lançamento da KLD!

O Plasmax KLD é um aparelho de Jato de Plasma, agora em uma versão leve, ergonômica e portátil, totalmente SEM FIO, pensando na praticidade e na precisão no momento da aplicação. O Plasmax é o Jato de Plasma Portátil mais potente do mercado, com 3 watts de potência e com intensidade que vai de 150 a 3000mW, facilitando assim o controle na programação. Com bateria de 2700mAh, o Plasmax possibilita inúmeras aplicações sem precisar ser carregado, otimizando o tempo nos seus atendimentos.

O Plasmax KLD foi desenvolvido pensando única e exclusivamente na rotina dos profissionais, com perfeita ergonomia, seu design foi produzido para encaixar perfeitamente na mão, apoiando-se nela e tornando os procedimentos mais confortáveis e com mais estabilidade. Indicado para flacidez palpebral, rugas, cicatrizes e lesões de pele, oferece resultados duradouros e naturais.

# DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS

O Plasmax KLD conta com 04 modos de aplicação:

- Modo Pulsado: indicado para técnica de fulguração por varredura, as opções de frequência de pulso são: 10Hz, 5Hz, 1,2Hz, 1Hz, 0,8Hz.
- Modo One Shot: Indicado para técnica de fulguração pontual. Cada ponto terá a duração selecionada no shot. As opções são: 0,1s/0,2s/0,3s/0,4s/0,5s e 0,6s.
- Modo Contínuo: Indicado para técnica de fulguração pontual.
- Modo plasmaporção: Indicado para técnica de contato, possui 02 níveis.

O Plasmax KLD conta com 5 ponteiros, tornando seu atendimento ainda mais versáteis e oferecendo diversas possibilidades de tratamentos.



**PLASMAX**

## 5 PONTEIRAS

**Suporte Agulha**  
Destina-se a utilização para a fulguração com agulhas descartáveis de eletrolifting.

**Disco Maior 20mm**  
Destina-se a técnica de aplicação de contato em áreas maiores, como a região do colo e do pescoço.

**Cônica**  
Utilizada para fazer a fulguração, mas gera uma concentração de energia levemente menor do que a agulha.

**Disco Menor 10mm**  
Destina-se a técnica de aplicação de contato em áreas mais planas, como a região da testa.

**Esférica**  
Destina-se a utilização da técnica de aplicação de contato.

**KLD** 40 ANOS  
EXCELÊNCIA

- Suporte agulha: para aplicação de fulguração, com agulhas descartáveis de eletrolifting.

- Disco maior 20mm: para técnica de aplicação de contato em áreas maiores, como a região do colo e do pescoço.
- Disco menor 10mm: para técnica de aplicação de contato em áreas mais planas, como a região da testa.
- Cônica: para fulguração, gerando uma concentração de energia levemente menor do que a agulha.
- Esférica: para aplicação de contato.
- Mais potente do Mercado, o Plasmamax conta com 3 Watts de potência e Intensidade de 150 a 3000mW.
- Leve, ergonômico e portátil, o Plasmamax é totalmente SEM FIO e possui bateria de 2700mAh.



## INDICAÇÕES

- Flacidez palpebral
- Rugas
- Cicatrizes e lesões de pele

## DADOS TÉCNICOS

- Modelo: Plasmax – Jato de Plasma Portátil KLD
- Marca: KLD
- Potência: 3 Watts
- Intensidade: 150 a 3000mW
- Bateria: 2700mAh
- Modos de aplicação: Pulsado, One Shot, Contínuo e Plasmaporção
- Registro ANVISA: 10245239018

## ITENS INCLUSOS

- 01 Plasmax – Aparelho de Jato de Plasma Portátil KLD
- 01 Ponteira Suporte agulha
- 01 Ponteira Disco maior 20mm
- 01 Ponteira Disco menos 10mm
- 01 Ponteira Cônica
- 01 Ponteira Esférica
- 10 Agulhas
- 01 Cabo USB